



# Auri™ D4 and D16 Docking Station Quick Start Guide



Docking Station 4  
**Auri-D4**




Docking Station 16  
**Auri-D16**



Docking Station Case 16  
**Auri-DC16**



Intelligent Cable Management Unit  
**LA-382**

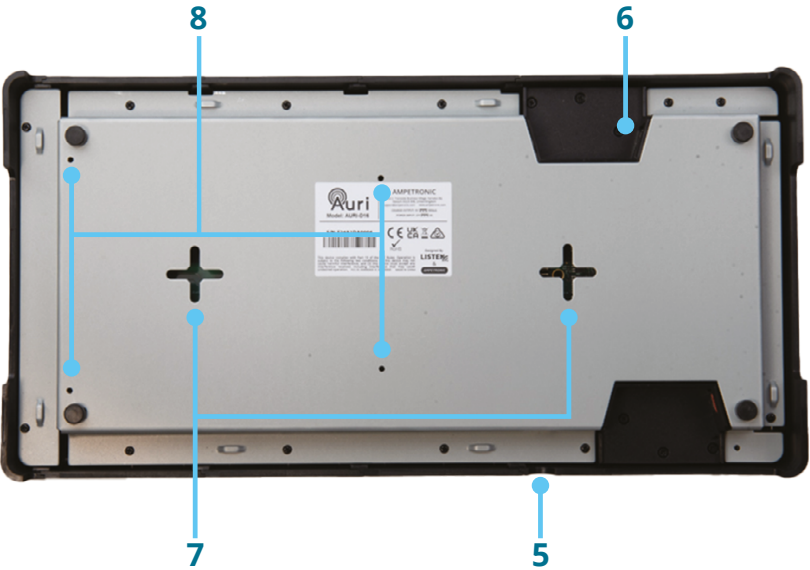

1. Tlačítko Kopírovat
2. Kopírování LED
3. Stavová LED dioda
4. Stavové tlačítko
5. Napájecí konektor
6. Síťový konektor
7. Otvory pro montáž na stěnu
8. Držáky LA-382

### Nastavení a nabíjení

1. Umístěte dokovací stanici na rovnou plochu nebo kuchyňskou linku. Alternativně lze dokovací stanici namontovat na stěnu nebo jiný povrch pomocí štěrbin pro montáž na stěnu (AURI-D4 a AURI-D16).
2. Připojte dokovací stanici do elektrické zásuvky pomocí dodaného napájecího zdroje.
3. Vložte přijímače Auri™ do nabíjecích otvorů. LED dioda horního přijímače(ů) bude blikat, což znamená, že se baterie nabíjí, a po plném nabití začne svítit.

**Poznámka:** Nezavírejte pouzdro dokovací stanice, pokud je připojeno k napájení! Pouzdro musí zůstat otevřené, aby bylo zajištěno správné větrání během nabíjení (AURI-DC16).

### Základní provoz

**Stavové tlačítko** - Stisknutím stavového tlačítka rozsvítíte displeje všech přijímačů a zobrazíte informace o stavu.

**Tlačítko Kopírovat** - Krátkým stisknutím se zkopíruje knihovna názvů vysílání a šifrovacích klíčů z dokovací stanice do všech přijímačů v ní, během tohoto procesu pomalu bliká červená LED dioda. Dlouhým stisknutím se zkopírují názvy vysílání, šifrovací klíče a nastavení konfigurace přijímače z dokovací stanice do všech přijímačů v ní, během tohoto procesu rychle bliká červená LED dioda. Podržetím tlačítka po dobu delší než 5 s se operace zruší, červená LED dioda zhasne, což znamená, že nebude provedena žádná akce.

**Poznámka:** Ke konfiguraci názvů vysílání, šifrovacích klíčů a nastavení přijímače uložených v dokovací stanici je vyžadován software Auri™ Manager. Ve výchozím nastavení budou všechny názvy vysílání a šifrovací klíče prázdné a nastavení přijímače bude odpovídat výchozímu továrnímu nastavení přijímače.

### Jednotka inteligentní správy kabelů LA-382

K dispozici je jednotka pro správu kabelů pro pohodlné uložení sluchátek, ušních reproduktorů, poutek na krk a dalšího příslušenství (k dispozici pouze pro AURI-D16).

### Auri™ Manager Software

Softwarová aplikace Auri™ Manager je nutná k provádění jakýchkoli změn nastavení na dokovací stanici a prohlížení a správě přijímačů v ní.

1. Vyhledejte v Microsoft® Store „Auri™ Manager“ a nainstalujte aplikaci. <https://www.microsoft.com/store/productId/9NRJLR0V9QXH>
2. Připojte dokovací stanici k počítači pomocí jediného síťového kabelu nebo je připojte oba ke stejné existující síti.
3. Otevřete Auri™ Manager a ověřte, že je dokovací stanice viditelná v seznamu zařízení. Při přímém připojení to může trvat přibližně 2 minuty po připojení a zapnutí dokovací stanice.
4. Klikněte na dokovací stanici a zadejte přihlašovací údaje, které chcete pro zařízení použít, poté zadejte výchozí přihlašovací údaje, jak je uvedeno na štítku zařízení.
5. Pomocí softwaru aktualizujte dokovací stanici a firmware přijímače, upravte nastavení přijímače, jako je výchozí hlasitost, a spravujte knihovnu známých názvů vysílání a šifrovacích klíčů.

Kompletní informace o péči a používání naleznete na webových stránkách Auri™, kde si můžete stáhnout příručku k systému Auri™ a podpůrný software Auri™ Manager. [www.auriaudio.com](http://www.auriaudio.com)



**Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.**  
**Palackého třída 19/114**  
**612 00 Brno**

**Email: [info@unb.cz](mailto:info@unb.cz)**

**Hlasový telefon: (+420) 541 245 321**

**Hlasový telefon nebo SMS: (+420) 725 605 216**

**[www.pomuckyproneslysici.cz](http://www.pomuckyproneslysici.cz)**

**AMPETRONIC**

**AMPETRONIC** Unit 2, Trentside Buisness Village, Farndon Road, Newark NG24 4XB,  
United Kingdom | **Phone:** +44.1636.610062 **[www.ampetronic.com](http://www.ampetronic.com)**

**LISTEN**  
TECHNOLOGIES

**LISTEN TECHNOLOGIES** 14912 Heritage Crest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818  
USA | **Phone:** +1.801.233.8992 **Toll-Free:** 1.800.330.0891 **[www.listentech.com](http://www.listentech.com)**

The Bluetooth ® word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Listen Technologies and Ampetronic are under license. Audinate®, the Audinate logo and Dante® are registered trademarks of Audinate Pty Ltd. Other trademarks are trade names of their respective owners. Windows ® is a trademark of the Microsoft ® group of companies.

20241017 | UP1B603-2